

AOSEPT[^] PLUS reinigings -en desinfectievloeistof met HydraGlyde^{*}

CE Master Text

PACKAGE INSERT

AOSEPT[^] PLUS


3% Waterstofperoxide

Reinigings -en desinfectievloeistof
met HydraGlyde^{*}



BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT EN DE VEILIGHEID. DEZE INFORMATIE GOED LEZEN EN ZORGVULDIG BEWAREN OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN. ONJUIST CONTACTLENSONDERHOUD KAN TOT ERNSTIGE OOGPROBLEMEN LEIDEN.

AOSEPT[^] PLUS contactlens-verzorgingssysteem met HydraGlyde^{*} Moisture Matrix voor het reinigen, desinfecteren, neutraliseren, verwijderen van proteïnen en bewaren van alle typen contactlenzen, inclusief silicone hydrogellenzen. Het AOSEPT PLUS systeem bestaat uit: de AOSEPT PLUS reinigings- en desinfectievloeistof met HydraGlyde Moisture Matrix (zie afbeelding 1) en de AOSEPT PLUS lenscup (zie afbeelding 2). De AOSEPT PLUS lenscup bestaat uit een doorzichtige cup en een aaneengesloten eenheid met schroefdop, lenshouders (korfjes) en de AODISC[^] neutraliserende katalysator bevestigd aan de onderkant. Verzeker u ervan dat de AODISC bevestigd is vóór het gebruik omdat dit essentieel is voor de neutralisatie van de waterstofperoxide. AOSEPT PLUS vloeistof en de AOSEPT PLUS lenscup moeten altijd samen worden gebruikt. De conserveermiddelvrije, waterige AOSEPT PLUS oplossing met HydraGlyde Moisture Matrix bevat: waterstofperoxide 3%, fosforic acid (stabilisator), sodium chloride, phosphate (buffersysteem), poloxamer (oppervlaktereiniger), HydraGlyde Moisture Matrix (EOBO-21^{*} – polyoxyethyleen-polyoxybutyleen).

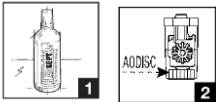


Bewerkt door middel van aseptische technieken.

GEBRUIKSAANWIJZIGING

1. Was uw handen en droog ze af met een schone handdoek.
2. Open de met “L” gemarkeerde lenshouder en plaats uw linkerlens op het koepeltje. Sluit de lenshouder; let erop dat de lens niet klem raakt.
3. Herhaal deze werkwijze met uw rechterlens; leg deze op het koepeltje van de andere lenshouder gemarkeerd met “R”.
4. Open de sluitingsdop van de AOSEPT PLUS flacon en buig deze naar achteren en uit de weg.
5. Spoel grondig de lenzen af in de lenshouders met AOSEPT PLUS gedurende 5 seconden (zie afbeelding 3).



6. Vul de cup met AOSEPT[^] PLUS vloeistof tot de markeringsstreep. NIET TE VEEL NOCH TE WEINIG VLOEISTOF (zie afbeelding 4).

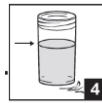

7 . Plaats de lenshouder in de AOSEPT PLUS cup en draai het deksel vast. De cup niet schudden.

8. Zet de lenscup rechtop weg (zie afbeelding 5).



- Als er vanuit de opening bovenin het deksel van de lenscup belletjes verschijnen, kan er nog niet-geneutraliseerde AOSEPT PLUS vloeistof aanwezig zijn. Gooi de oplossing uit de lenscup weg en verwijder de gemorste resten van het oppervlak waar de AOSEPT PLUS lenscup heeft gestaan. Spoel grondig de AOSEPT PLUS cup en lenshouder met steriele zoutoplossing. Indien u gemorst heeft, ruim dit onmiddellijk op met een papieren doekje. Was uw handen grondig alvorens u uw lenzen of uw ogen aanraakt.

HERHAAL DE BOVENSTAANDE DESINFECTIE PROCEDURE.

9. Laat de lenzen ten minste 6 uur (zie afbeelding 6) of gedurende de nacht ondergedompeld staan om de oplossing te neutraliseren.




10. Neem uw lenzen uit de lenshouder.

11. Uw lenzen zijn nu klaar voor gebruik.

12. Gooi de gebruikte vloeistof weg, spoel de AOSEPT PLUS cup en lenshouder met steriele zoutoplossing – GEBRUIK GEEN LEIDINGWATER OF NIET-STERIEL WATER.

13. Laat beiden aan de lucht drogen door de lenshouder naast de cup om te keren (zie afbeelding 7).

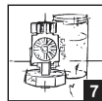

14. Indien u niet van plan bent de lenzen meteen in te zetten na de desinfectie/neutralisatie, kan u ze bewaren in de geneutraliseerde AOSEPT PLUS vloeistof, in de ongeopende AOSEPT PLUS lenscup tot 14 dagen. Na deze periode moet u uw lenzen reinigen en desinfecteren met AOSEPT PLUS alvorens de lenzen te dragen.





Indien aanbevolen door uw contactlensspecialist:

- Spoel de lenzen af alvorens ze in te zetten met een steriele zoutoplossing

CONTRA-INDICATIES (redenen om niet te gebruiken)

- Niet gebruiken indien u allergisch bent voor één van de bestanddelen.
- Gebruik AOSEPT PLUS nooit voor hittedesinfectie.


VOORZORGSMAATREGELEN

- Niet gebruiken na de vervaldatum. 
- Voor het eerste gebruik de verzegeling controleren. Indien reeds verbroken: niet gebruiken.
- De sluitingsdop van de flacon na gebruik sluiten.
- Zodra de flacon open is, dient de overgebleven vloeistof na 3 maanden te worden weggegooid. 
- Zorg dat de pipetpunt van de flacon nooit enig oppervlak raakt, daar dit de vloeistof kan besmetten.
- Gebruik steeds de nieuwe AOSEPT[^] PLUS lenscup die bij elke flacon AOSEPT PLUS vloeistof wordt geleverd.
- Bewaren beneden 25°C.  25°C
- Gebruik AOSEPT[^] PLUS vloeistof altijd tussen 15°C en 25°C omdat neutralisatie beneden 15°C langer kan duren dan 6 uur.
- Niet in direct zonlicht plaatsen. 
- Raadpleeg uw contactlensspecialist voordat u van vloeistof verandert.

WAARSCHUWINGEN

- **PROBEER NOOIT DE LENZEN TE REINIGEN OF TE SPOELEN IN UW HANDEN MET AOSEPT PLUS VLOEISTOF. EEN LICHTTE, TIJDELIJKE VERKLEURING VAN DE HUID (BLEKER WORDEN) KAN VOORKOMEN NA CONTACT MET DE NIET-GENEUTRALISEERDE OPLOSSING.**
- **PROBEER NOOIT DE LENZEN TE REINIGEN MET EEN AFZONDERLIJKE REINIGINGSVLOEISTOF, OMDAT ELK RESIDU HIERVAN DE VLOEISTOF IN DE LENS CUP ZAL DOEN SCHUIMEN EN OVERLOPEN UIT DE LENS CUP.**
- **Betekenis van de rode sluitingsdop: Nooit niet-geneutraliseerde AOSEPT PLUS oplossing**

 **direct in het oog brengen.**

- **GEBRUIK ALLEEN DE INGESLOTEN AOSEPT PLUS LENS CUP. GEBRUIK GEEN ENKELE ANDERE LENS CUP.**
- **Let erop dat uw lenzen ten minste 6 uur ondergedompeld staan in de bijgeleverde lenscup (neutralisatie proces) alvorens ze in te zetten. NIET-GENEUTRALISEERDE AOSEPT PLUS VLOEISTOF IS EEN UITERST EFFICIËNT DESINFECTANT DAT EEN BRANDERIG GEVOEL ZAL VEROORZAKEN indien het in contact komt met het oog. Indien u per ongeluk een niet-geneutraliseerde lens in het oog brengt, neem ze onmiddellijk uit en spoel het geopende oog overvloedig met steriel water of zoutoplossing. Desinfecteer de lens opnieuw alvorens ze in te zetten.**
- Steeds verse AOSEPT PLUS vloeistof gebruiken - nooit de vloeistof in de lenscup hergebruiken omdat de werkzaamheid ervan dan teniet gedaan wordt.
- **NOOIT AOSEPT PLUS overgieten in een andere flacon.** 
- **NOOIT AOSEPT PLUS verdunnen of mengen met om het even welke oplossing aangezien dit de werking zal teniet doen.**

• BRENG CONTACTLENZEN NOOIT IN CONTACT MET NIET-STERIELE VLOEISTOFFEN, (INCLUSIEF LEIDINGWATER EN SPEEKSEL) DAAR MICROBIËLE BESMETTING KAN OPTREDEN, HETGEEN KAN LEIDEN TOT PERMANENTE OOGBESCHADIGING.



- BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.
- Indien niet-geneutraliseerde AOSEPT[^] PLUS oplossing werd ingeslikt, onmiddellijk grote hoeveelheden water drinken en uw arts raadplegen.
- Raadpleeg uw arts of contactlensspecialist alvorens om het even welke medicatie te gebruiken in combinatie met contactlenzen.

ONGEWENSTE REACTIES

In geval van aanhoudend ongemak of irritatie, neem uw lenzen uit, staak het gebruik van het product en raadpleeg uw contactlensspecialist.

HOE GELEVERD

AOSEPT PLUS vloeistof met HydraGlyde* Moisture Matrix, dat gesteriliseerd is door filtratie, wordt in verpakkingsgroottes van 90ml en 360ml geleverd. Een lenscup met AODISC[^] wordt bij elke flacon AOSEPT PLUS met HydraGlyde geleverd.



Fabrikant

Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas 76134-2099, USA

CE 0123



Officiële vertegenwoordiger in de EU

Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR,
Verenigd Koninkrijk

Gedistribueerd door:
{België : Alcon NV, Vilvoorde
Nederland: Alcon Nederland BV, Breda}

Datum van voorbereiding:
{as appropriate}

*Een handelsmerk van Novartis

[^]Een handelsmerk van de American Optical

© 2014 Novartis

AOSEPT[^] PLUS with HydraGlyde* cSLT EU (Insert, Carton, Bottle Label)
gSLT Asset ID# 142642-0714

Page 4 of 4
Updated: February 03, 2015
Catalyst Asset ID 137738 Revision: 0215