

OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution
PACKAGE INSERT for all bottle sizes

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar hem voor latere raadpleging.

OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution

De 16 uur durende bevochtiging van de lenzen zorgt voor een comfortabel gevoel vanaf het inzetten van de lenzen tot het moment waarop ze worden uitgedaan

Reinigt, verzorgt, spoelt, desinfecteert, bewaart

Verwijdert dagelijks vet- en eiwitaanslag

Voorkomt vetaanslag

Voor alle silicone hydrogellenzen en zachte contactlenzen

BESCHRIJVING:

OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution is een steriele, gebufferde, waterige oplossing. Het bevat natriumcitraat, natriumchloride, boorzuur, aminomethylpropanol, sorbitol, dinatriumedetaat, twee bevochtigende bestanddelen (TETRONIC® 1304† en HydraGlyde® Moisture Matrix [EOBO - 41™- polyoxyethyleen-polyoxybutyleen]) en POLYQUAD® (polyquaternium-1) en ALDOX® (myristamidopropyl dimethylamine) conserveermiddelen in een concentratie van 0,001% respectievelijk 0,0006%. HydraGlyde® Moisture Matrix is een multi-functioneel blokcopolymeer dat primair is ontworpen voor het bevochtigen en hydrateren van silicone hydrogellenzen.

†TETRONIC® is een geregistreerd handelsmerk van BASF.

WERKING:

Als u **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution** gebruikt zoals aangegeven:

- Reinigt het door dagelijks vet- en eiwitaanslag op uw lenzen te verwijderen tijdens het desinfecteren en bewaren.
- Werken de biocompatibele, dubbele desinfectiemiddelen POLYQUAD® en ALDOX® tegen schadelijke micro-organismen (bacteriën, schimmels en *Acanthamoeba*).
- Wordt het gebruikt voor het afspoelen en verzorgen van uw silicone hydrogellenzen en zachte (hydrofiele) contactlenzen.
- Is het ontworpen om lenzen na het desinfecteren maximaal 30 dagen te desinfecteren en te bewaren.

Als **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution** dagelijks wordt gebruikt, is een aparte enzymatische reiniger niet nodig. Bewaar uw lenzen niet in een zoutoplossing in plaats van in **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution**. Een zoutoplossing desinfecteert de lenzen niet.

INDICATIES (Gebruik):

Voor het dagelijks reinigen, verzorgen, afspoelen, verwijderen van vet- en eiwitaanslag, voorkomen van vetaanslag, chemisch desinfecteren (niet met hitte) en bewaren van silicone hydrogellenzen en zachte (hydrofiele) contactlenzen, zoals aanbevolen door uw oogzorgspecialist.

Voordelen voor het dragen van lenzen: bevochtiging, comfort, hydratatie en reiniging
OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution:

- Zorgt voor een 16 uur durende bevochtiging waardoor uw lenzen de hele dag door comfortabel aanvoelen. HydraGlyde® Moisture Matrix werkt onafhankelijk van uw traanfilm om uw lenzen vochtig te houden en zorgt voor een comfortabel gevoel vanaf het inzetten van de lenzen tot het moment waarop ze worden uitgedaan.
- Zorgt voortdurend voor een vochtig laagje waardoor uw ooglid zonder irritatie over het oppervlak van uw lens kan glijden.
- Zorgt de hele dag voor hydratatie van de lens.
- Bindt zich aan droge gedeeltes op de lens zodat vet- en eiwitaanslag wordt verhinderd en de lenzen schoon en fris blijven.
- Verwijdert vet- en eiwitaanslag voor schone en frisse lenzen.

CONTRA-INDICATIES (redenen om het product niet te gebruiken):

Gebruik dit product niet wanneer u allergisch bent voor één van de bestanddelen.

ALGEMENE AANWIJZINGEN:

- Verwijder vóór gebruik eerst volledig de geperforeerde folie om de hals van de fles.
- Was altijd uw handen en droog ze af voordat u uw contactlenzen aanraakt.
- Reinig, verzorg, spoel en desinfecteer uw lenzen iedere keer als u ze uitdoet.
- Kies steeds dezelfde lens eerst (de rechter of de linker) om verwisseling te voorkomen.
- Na gebruik de lenshouder altijd leeggieten, uitspoelen met verse **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution** en aan de lucht laten drogen.

VOLG DEZE AANWIJZINGEN VOOR HET REINIGEN, VERZORGEN, DESINFECTEREN EN VERWIJDEREN VAN EIWITTEN VOOR EEN OPTIMAAL RESULTAAT:

- Maak beide zijden van de lens volledig nat met **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution**. Wrijf de lens gedurende 20 seconden.
- Spoel iedere zijde van de lens gedurende 10 seconden af met een constante stroom **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution**.
- Vul uw ALCON® lenshouder met verse **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution**. Bewaar uw lenzen de hele nacht, of minstens 6 uur, in de gesloten lenshouder. Hierna zijn de lenzen klaar om gedragen te worden.

Als er aanslag op de contactlenzen achterblijft, moeten uw lenzen worden afgespoeld met **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution** voordat ze worden ingezet. U kunt uw lenzen maximaal 30 dagen bewaren in een gesloten lenshouder die gevuld is met **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution**. Daarna moeten uw lenzen voordat ze worden gedragen met **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution** worden gereinigd en gedesinfecteerd.

Volg altijd de instructies van uw oogzorgspecialist op. Wijzig niets in de manier waarop u uw

lenzen verzorgt en verwissel niet van lensverzorgingsproduct zonder uw oogzorgspecialist te raadplegen.

WAARSCHUWINGEN:

Het is van groot belang dat u de aanwijzingen van uw oogzorgspecialist en alle op de bijsluiters en verpakking genoemde instructies opvolgt voor een juist gebruik en een optimale verzorging van uw lenzen en uw lensverzorgingsproducten, inclusief uw lenshouder. Als u last krijgt van aanhoudend ongemak in de ogen, overmatig tranen, veranderingen in uw gezichtsvermogen of rode ogen, doe de lenzen dan ONMIDDELIJK uit en raadpleeg uw oogzorgspecialist. Het probleem zou namelijk ernstiger kunnen worden.

VOORZORGEN:

- Gebruik altijd verse **OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution**. Hergebruik de oplossing in uw lenshouder niet.
- Zorg ervoor dat de tip van de fles nooit ergens mee in aanraking komt, om verontreiniging te voorkomen.
- Doe de dop er na gebruik weer op.
- Bewaren bij kamertemperatuur.
- Houd de fles altijd goed gesloten wanneer u deze niet gebruikt.
- Gebruik het product vóór de op het doosje en de fles vermelde vervaldatum. 
- Gooi overgebleven vloeistof 6 maanden na eerste opening weg.
- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet voor gebruik met hitte (thermische) desinfectie.

INHOUD VAN DE VERPAKKING:

OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution (dat wordt gesteriliseerd door filtratie) is verkrijgbaar in plastic flessen van 60 ml, 90 ml en 300 ml.

STERILE	A
---------	---

ALCON® lenshouder (**OPTIONAL**)

DISTRIBUTEUR VOOR BELGIË EN LUXEMBURG:

ALCON NV
Medialaan 36
B-1800 Vilvoorde

DISTRIBUTEUR VOOR NEDERLAND:

Alcon Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 142
4848 CP Breda



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, USA 76134-2099



Alcon Laboratories (UK) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR,
Verenigd Koninkrijk
nigd Koninkrijk

Europese patentnummers: 0639070, 0669803 en 0948357

CE 0123
© 2011 Novartis